


## ZenSetiv Siliconenpleisters met split <sup>CE</sup>

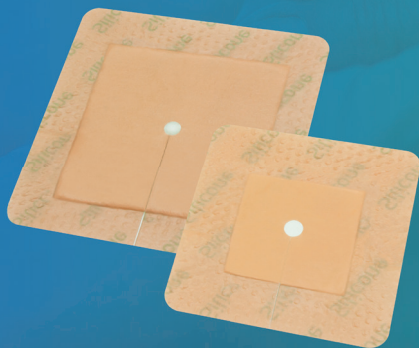

Zeer soepele pleisters:  
vormen zich naar de huid

Hoog draagcomfort, dankzij de  
huidvriendelijke, siliconen kleeflaag

Met luchtdoorlatend schuimverband

Geschikt voor: drains, sondes, katheters

### Productomschrijving


De ZenSetiv Siliconenpleisters met split zijn uitstekend geschikt voor het afdekken van de insteekopening van drains, sondes en katheters. Het soepele en sluitende splitgaas vormt zich, met behulp van de opening aan het uiteinde van de split, passend rond de drain, sonde of katheter. De pleisters hebben een huidvriendelijke siliconen kleeflaag. Het aanbrengen en verwijderen van de pleister is zeer eenvoudig door de siliconen kleeflaag. De pleisters bevatten bovendien een absorberend schuimverband dat kleine hoeveelheden (wond)vocht kan absorberen en vasthouden.

# ZenSetiv Siliconenpleisters met split

ZENsetiv

## Gebruiksaanwijzing

1. Reinig eerst zo nodig de huid rondom de insteekopening van de drain, sonde of katheter. Vermijd eventueel gebruik van alcohol, ether, vette crèmes etc.
2. Verwijder een gedeelte van de beschermfolie van de pleister.
3. Breng de pleister in de juiste positie. Met behulp van de split kan de opening tot aan de drain, sonde of katheter gebracht worden.
4. Breng de pleister op de huid aan.
5. Verwijder vervolgens het andere gedeelte van de beschermfolie van de pleister.
6. Breng de rest van de pleister op de huid aan.
7. Wrijf de pleister aan.

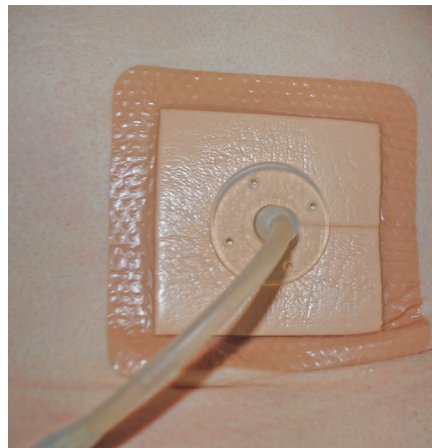

### Waarschuwing:

De ZenSetiv Siliconenpleisters met split kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. Hergebruik kan leiden tot kruisbesmetting.

| Product                       | ZenSetiv Siliconenpleisters met split |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Inhoud                        | 20 stuks                              |
| Artikelcode - 7,5 cm x 7,5 cm | ASR275                                |
| Artikelcode - 10 cm x 10 cm   | ASR2100                               |

Distributeur: Wellform Medical BV • Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren  
T 088 - 6670065 • E info@wellform.nl • I www.wellform.nl  
 OxMed International GmbH, Groendahlscherweg 87, D46446 Emmerich am Rhein, Germany

ISS02/2017/09