

Silfy Siliconentape ^{CE}



- ✓ Huidvriendelijke, krachtige en pijnloze fixatie
- ✓ Waterproof
- ✓ Kan meerdere dagen op de huid blijven zitten
- ✓ Behoud kleefkracht bij herpositioneren
- ✓ Zeer eenvoudig op maat te scheuren, aan te brengen en pijnloos te verwijderen

Productomschrijving

Silfy Siliconentape is een breed inzetbaar product voor situaties waar een uiterst huidvriendelijke kleefkracht met een zo beperkt mogelijke belasting van de huid vereist is. Zachte en maximale bescherming bij optimale hechting. Bijvoorbeeld wanneer de huid als gevolg van radiotherapie, chemotherapie of dialyse broos en/of beschadigd is. Ook toepasbaar bij het (extra) fixeren van katheters, wond- of stomaproducten. Zeer eenvoudig op maat te scheuren, aan te brengen en pijnloos te verwijderen. Behoud z'n kleefkracht, zelfs na meerdere keren positioneren.

Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

- Maak de huid vrij van eventuele haren
- Zorg voor een schone en vetvrije huid (bij voorkeur de huid eerst reinigen met water)
- Vermijd het gebruik van crèmes en poeders
- Dep de huid goed droog (let op: de tape hecht niet op een vochtige ondergrond)

Aanbrengen

- Breng het te fixeren product in de juiste positie
- Bepaal de gewenste lengte van de siliconentape
- Scheur de siliconentape af
- Breng de siliconentape aan
- Wrijf over de siliconentape voor een optimale hechting

Verwijderen

- Maak de uiteinden van de siliconentape los
- Trek of pel de siliconentape voorzichtig van de huid
- Deponeer het verwijderde materiaal bij het huisvuil



Voor meer informatie kijk op www.wellform.nl

Product	Inhoud	Artikelcode
Silfy Siliconen Wond Fixatietape 1.5m x 2.5cm	1 stuk	SST25150
Silfy Siliconen Katheter Fixatietape 1.5m x 2.5cm	1 stuk	SST25150K
Silfy Siliconen Stoma Fixatietape 1.5m x 2.5cm	1 stuk	SST25150S
Silfy Siliconen Uro Fixatietape 1.5m x 2.5cm	1 stuk	SST25150U
Silfy Siliconen Sonde Fixatietape 1.5m x 2.5cm	1 stuk	SST25150V