



- ✓ Dunne ontlasting wordt ingedikt
- ✓ Kan lekkage onder de huidplaat of via het filter verminderen
- ✓ Helpt de geur van ontlasting te neutraliseren

## Productomschrijving

De AllSorb sachets bevatten sterk absorberende korrels die dunne ontlasting in stomazakjes indikken. De 'filmlaag' lost op wanneer het in contact komt met dunne ontlasting. De korrels komen vervolgens vrij om de ontlasting in te dikken. Binnen enkele seconden is het resultaat merkbaar en worden vervelende geluiden veroorzaakt door ontlasting in het zakje verminderd.

De korrels neutraliseren de geur van de ontlasting. Dit is erg prettig tijdens het verwisselen en/of legen van het zakje. Het legen van het ileostomiezakje gaat een stuk eenvoudiger, omdat de ontlasting is ingedikt. De sachets kunnen zowel in colostomie-als ileostomiezakjes worden gebruikt.

## Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

1. Colostomiezakje: plaats één sachet met absorberende korrels in het nieuwe stomazakje voordat deze aangebracht wordt (zie foto 1).
2. Ileostomiezakje: plaats één sachet met absorberende korrels in het nieuwe stomazakje voordat deze aangebracht wordt (zie foto 1). Een reeds aangebracht ileostomiezakje dient eerst geleegd te worden en de opening aan de onderkant schoon te worden gemaakt. Daarna kan 1 sachet door deze opening in het ileostomiezakje geplaatst worden (zie foto 2).

Foto 1



Foto 2



Voor meer informatie kijk op [www.wellform.nl](http://www.wellform.nl)

Product	Inhoud	Artikelcode
AllSorb	90 stuks	WMAS90