

APzyme ^{CE}



- ✓ Ontlasting glijdt makkelijker in het stomazakje
- ✓ Neutraliseert onaangename geuren
- ✓ Kan 'pancaking' voorkomen

Productomschrijving

APzyme is een anti-pancaking en geurneutraliserende gel voor gebruik in stomazakjes. Het kan voorkomen dat de ontlasting bovenin het stomazakje blijft hangen en ophoopt voor de ingang van de stoma. Dit verschijnsel wordt ook wel 'pancaking' genoemd. Met behulp van APzyme kan dit voorkomen worden.

APzyme is een gel, die aan de binnenkant van het stomazakje gesmeerd dient te worden zodat de ontlasting in het zakje gemakkelijk naar beneden kan glijden.

Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

1. Open een sachet (zie foto 1).
2. Doe de inhoud van een sachet APzyme in een schoon stomazakje (zie foto 2).
3. Smeer APzyme aan de binnenkant van het stomazakje goed in. Vermijd daarbij klontvorming. Let op: smeer alleen de bovenkant van het zakje in. (zie foto 3).
4. Breng het stomazakje aan als gebruikelijk.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Voor meer informatie kijk op www.wellform.nl

Product	Inhoud	Artikelcode
APzyme	40 stuks	APG40