


# Hersubel Original CE

First class hernia support bandages

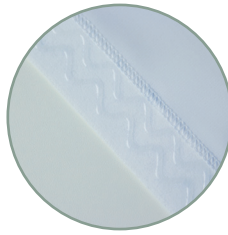

- Brede siliconenstrip voor optimaal draagcomfort
- Eenvoudig te positioneren en te bevestigen dankzij de klittenbandsluiting en geïntegreerde 'handschoen'.
- Voor optimale en comfortabele ondersteuning
- Inzetbaar bij parastomale hernia's

Product	Maat	Breedte	Wit	Zwart	Beige
<b>Hersubel Original steunbandage</b>  hoogte 16 cm	XS	tot 75 cm	F16WXS	F16ZXS	F16BXS
	S	75 tot 90 cm	F16WS	F16ZS	F16BS
	M	90 tot 105 cm	F16WM	F16ZM	F16BM
	L	105 tot 120 cm	F16WL	F16ZL	F16BL
	XL	120 tot 135 cm	F16WXL	F16ZXL	F16BXL
	XXL	135 cm tot 150 cm	F16WXXL	F16ZXXL	F16BXXL


Product	Maat	Breedte	Wit	Zwart	Beige
<b>Hersubel Original steunbandage</b>  hoogte 20 cm	XS	tot 75 cm	F20WXS	F20ZXS	F20BXS
	S	75 tot 90 cm	F20WS	F20ZS	F20BS
	M	90 tot 105 cm	F20WM	F20ZM	F20BM
	L	105 tot 120 cm	F20WL	F20ZL	F20BL
	XL	120 tot 135 cm	F20WXL	F20ZXL	F20BXL
	XXL	135 cm tot 150 cm	F20WXXL	F20ZXXL	F20BXXL

Product	Maat	Breedte	Wit	Zwart	Beige
<b>Hersubel Original steunbandage</b>  hoogte 26 cm	XS	tot 75 cm	F26WXS	F26ZXS	F26BXS
	S	75 tot 90 cm	F26WS	F26ZS	F26BS
	M	90 tot 105 cm	F26WM	F26ZM	F26BM
	L	105 tot 120 cm	F26WL	F26ZL	F26BL
	XL	120 tot 135 cm	F26WXL	F26ZXL	F26BXL
	XXL	135 cm tot 150 cm	F26WXXL	F26ZXXL	F26BXXL
	XXXL	150 cm tot 165 cm	F26WXXXL	F26ZXXXL	F26BXXXL



Wellform Medical BV  
Muskushouwestraat 33  
6666 MA Heteren • Nederland  
T +31 (0)88 - 6670065 • E info@wellform.nl  
www.wellform.nl

## Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

  
**Hersubel**<sup>®</sup>

### Hersubel Original

De Hersubel Original steunbandage biedt optimale en comfortabele ondersteuning aan de buik en parastomale hernia's. Ook tijdens activiteiten en inspanningen. De steunbandage is beschikbaar in de kleuren beige, zwart en wit. Voor de verschillende maatvoeringen kijkt u in de maattabel aan de achterzijde. Op verzoek kunt u ook een op maat gemaakte steunbandage bestellen.



#### Stap 1

Breng de steunbandage bij voorkeur liggend aan. Leg de band neer ter hoogte van uw taille.



#### Stap 2

Houd met de ene hand het klittenband-gedeelte van de steunbandage vast en schuif de andere hand in de 'handschoen'.



#### Stap 3

Breng de band rondom uw middel aan. Met behulp van de 'handschoen' kan de steunbandage eenvoudig gepositioneerd worden om zo de meest optimale steun te bieden.



#### Stap 4

Zorg ervoor dat de stof ter hoogte van de stoma gepositioneerd is. Het klittenband dient buiten het gebied van de stoma gedragen te worden.