

Hersubel CE

First class hernia support bandages



Aanmeten Hersubel steunbandage

Original / Tube

Meet de omtrek van de buikomvang in zowel liggende, staande als zittende houding over de stoma heen. Meet vervolgens de hoogte van de buikstreek (vanaf +/- 5cm boven de breuk). Aan de hand van deze meetgegevens kan de juiste maat van de Hersubel steunbandage worden gekozen. Het advies is om de gemiddelde maat aan te houden.



Opmeten buikomvang liggend



Opmeten hoogte buikstreek liggend



Opmeten buikomvang staand



Opmeten hoogte buikstreek staand



Opmeten buikomvang zittend



Opmeten hoogte buikstreek zittend

Gebruiksadvies Hersubel Original

Liggend aanbrengen



Stap 1

Breng de steunbandage bij voorkeur liggend aan. Leg de band neer ter hoogte van uw taille.



Stap 2

Houd met de ene hand het klittenband-gedeelte van de steunbandage vast en schuif de andere hand in de 'handschoen'.



Stap 3

Breng de band rondom uw middel aan. Met behulp van de 'handschoen' kan de steunbandage eenvoudig gepositioneerd worden om zo de meest comfortabele steun te bieden. Zorg ervoor dat de stof ter hoogte van de stoma gepositioneerd is. Het klittenband dient buiten het gebied van de stoma gedragen te worden.



Resultaat

De steunbandage is op de juiste wijze aangebracht.

Gebruiksadvies Hersubel Original

Staan aanbrenge



Stap 1

Breng de band van achter uw rug ter hoogte van uw taille aan.



Stap 2

Houd met de ene hand het klittenband-gedeelte van de steunbandage vast en schuif de andere hand in de 'handschoen'.



Stap 3

Breng de band rondom uw middel aan. Met behulp van de 'handschoen' kan de steunbandage eenvoudig gepositioneerd worden om zo de meest comfortabele steun te bieden. Het kan zinvol zijn om na het staande aanbrenge van de band nog even te gaan liggen om de band wat strakker aan te brengen aangezien de hernia liggend wat kan inzakken.



Stap 4

Zorg ervoor dat de stof ter hoogte van de stoma gepositioneerd is. Het klittenband dient buiten het gebied van de stoma gedragen te worden om de juiste afvloed van output te garanderen.



Resultaat

De steunbandage is op de juiste wijze aangebracht.

Aandachtspunten

- Zorg ervoor dat de band comfortabele steun geeft.
- Voorkom dat de band te strak zit door de klittenbandbevestiging iets losser te bevestigen.
- Indien de band aan de bovenkant bij de taille wat wijkt kunt u overwegen om de band iets schuin te sluiten.
- Draag bij voorkeur de band op de huid en niet over een hemd of shirt.

Onderhoud van de Hersubel Original steunbandage

- De steunbandage kan worden gewassen in de wasmachine op maximaal 40°C.
- De steunbandage aan de lucht laten drogen, dus niet in een droogtrommel of op de verwarming laten drogen, omdat daardoor het materiaal van de steunbandage beschadigd kan worden.
- Het advies is om geen wasverzachter te gebruiken.

Kenmerken en beoogd gebruik

De Hersubel Original steunbandage biedt comfortabele ondersteuning aan de buik en parastomale hernia's. Ook tijdens activiteiten en inspanningen.

De steunbandage is verkrijgbaar in een reeks breedtes en lengtes passend voor alle gebruikers en wordt geleverd in beige, wit of zwart.

Doordat de steunbandage vervaardigd is van tweezijdig rekbaar materiaal, zal het de uitstulpingen en het trekkende gevoel veroorzaakt door de herniavorming verminderen, waarbij tegelijkertijd bewegingsvrijheid wordt ervaren.

Het comfort van het rekbare materiaal maakt langdurig dragen mogelijk en de antislip siliconen strips aan de buitenranden voorkomen onbedoelde beweging van de band tijdens het gebruik ervan of het omkrullen van de steunbandage bij de randen.

Afdoen van de Hersubel Original steunbandage

Doe uw hand in de 'handschoen' en trek de steunbandage los van de klittenbandbevestiging.

Probeer hierbij met uw andere hand de hernia wat te ondersteunen aangezien bij het verwijderen van de band de druk op uw buik verandert. Op deze wijze kan worden voorkomen dat het stomamateriaal verschuift.

Product overzicht Hersubel Original
Varianten - hoogte 16 cm



Artikelnummer	Variant	Omschrijving
F16WXS	XS - Wit	Breedte tot 75 cm
F16ZXS	XS - Zwart	Breedte tot 75 cm
F16BXS	XS - Beige	Breedte tot 75 cm
F16WS	S - Wit	Breedte 75 tot 90 cm
F16ZS	S - Zwart	Breedte 75 tot 90 cm
F16BS	S - Beige	Breedte 75 tot 90 cm
F16WM	M - Wit	Breedte 90 tot 105 cm
F16ZM	M - Zwart	Breedte 90 tot 105 cm
F16BM	M - Beige	Breedte 90 tot 105 cm
F16WL	L - Wit	Breedte 105 tot 120 cm
F16ZL	L - Zwart	Breedte 105 tot 120 cm
F16BL	L - Beige	Breedte 105 tot 120 cm
F16WXL	XL - Wit	Breedte 120 tot 135 cm
F16ZXL	XL - Zwart	Breedte 120 tot 135 cm
F16BXL	XL - Beige	Breedte 120 tot 135 cm
F16WXXL	XXL - Wit	Breedte 135 cm tot 150 cm
F16ZXXL	XXL - Zwart	Breedte 135 cm tot 150 cm
F16BXXL	XXL - Beige	Breedte 135 cm tot 150 cm

Product overzicht Hersubel Original

Varianten - hoogte 20 cm



Artikelnummer	Variant	Omschrijving
F20WXS	XS - Wit	Breedte tot 75 cm
F20ZXS	XS - Zwart	Breedte tot 75 cm
F20BXS	XS - Beige	Breedte tot 75 cm
F20WS	S - Wit	Breedte 75 tot 90 cm
F20ZS	S - Zwart	Breedte 75 tot 90 cm
F20BS	S - Beige	Breedte 75 tot 90 cm
F20WM	M - Wit	Breedte 90 tot 105 cm
F20ZM	M - Zwart	Breedte 90 tot 105 cm
F20BM	M - Beige	Breedte 90 tot 105 cm
F20WL	L - Wit	Breedte 105 tot 120 cm
F20ZL	L - Zwart	Breedte 105 tot 120 cm
F20BL	L - Beige	Breedte 105 tot 120 cm
F20WXL	XL - Wit	Breedte 120 tot 135 cm
F20ZXL	XL - Zwart	Breedte 120 tot 135 cm
F20BXL	XL - Beige	Breedte 120 tot 135 cm
F20WXXL	XXL - Wit	Breedte 135 cm tot 150 cm
F20ZXXL	XXL - Zwart	Breedte 135 cm tot 150 cm
F20BXXL	XXL - Beige	Breedte 135 cm tot 150 cm

Product overzicht Hersubel Original
Varianten - hoogte 26 cm



Artikelnummer	Variant	Omschrijving
F26WXS	XS - Wit	Breedte tot 75 cm
F26ZXS	XS - Zwart	Breedte tot 75 cm
F26BXS	XS - Beige	Breedte tot 75 cm
F26WS	S - Wit	Breedte 75 tot 90 cm
F26ZS	S - Zwart	Breedte 75 tot 90 cm
F26BS	S - Beige	Breedte 75 tot 90 cm
F26WM	M - Wit	Breedte 90 tot 105 cm
F26ZM	M - Zwart	Breedte 90 tot 105 cm
F26BM	M - Beige	Breedte 90 tot 105 cm
F26WL	L - Wit	Breedte 105 tot 126 cm
F26ZL	L - Zwart	Breedte 105 tot 126 cm
F26BL	L - Beige	Breedte 105 tot 126 cm
F26WXL	XL - Wit	Breedte 120 tot 135 cm
F26ZXL	XL - Zwart	Breedte 120 tot 135 cm
F26BXL	XL - Beige	Breedte 120 tot 135 cm
F26WXXL	XXL - Wit	Breedte 135 cm tot 150 cm
F26ZXXL	XXL - Zwart	Breedte 135 cm tot 150 cm
F26BXXL	XXL - Beige	Breedte 135 cm tot 150 cm
F26WXXXL	XXXL - Wit	Breedte 150 cm tot 165 cm
F26ZXXXL	XXXL - Zwart	Breedte 150 cm tot 165 cm
F26BXXXL	XXXL - Beige	Breedte 150 cm tot 165 cm

Gebruiksadvies Hersubel Tube

Liggend aanbrengen



Stap 1

Rek de tube met beide handen uit. "Stap" in de tube en trek deze op tot rond de bovenbenen.



Stap 2

Trek de achterzijde van de tube over uw zitvlak.



Stap 3

Breng de voorzijde van de tube over uw buik en stoma. Let hierbij op dat u de tube ter hoogte van de stoma over uw stomamateriaal heen tilt, dit om te voorkomen dat u het stomamateriaal los trekt.



Stap 4

Positioneer de tube in de juiste plaats.



Stap 5

Trek de tube, indien nodig, recht.



Resultaat

De tube is op de juiste wijze aangebracht.

Gebbruiksadvies Hersubel Tube Staand aanbrengen



Stap 1

Rek de tube met beide handen uit. "Stap" in de tube en trek deze op tot rond de bovenbenen.



Stap 2

Trek de achterzijde van de tube over uw zitvlak.

Vervolg Hersubel Tube

Staan aanbrengen



Stap 3

Breng de voorzijde van de tube over uw buik en stoma. Let hierbij op dat u de tube ter hoogte van de stoma er goed over heen tilt, dit om te voorkomen dat u het stomamateriaal los trekt.



Stap 4

Positioneer de tube in de juiste plaats.



Stap 5

Trek de tube, indien nodig, recht.



Resultaat

De tube is op de juiste wijze aangebracht.

Kenmerken en beoogd gebruik

De Hersubel Tube biedt comfortabele ondersteuning aan de buik en parastomale hernia's. Ook tijdens activiteiten en inspanningen.

De tube is verkrijgbaar in een reeks breedtes en lengtes passend voor alle gebruikers en wordt geleverd in beige of zwart.

Doordat de tube vervaardigd is van tweezijdig rekbaar materiaal, zal het de uitstulpingen en het trekkende gevoel veroorzaakt door de hernia-vorming verminderen, waarbij tegelijkertijd bewegingsvrijheid wordt ervaren.

Het comfort van het rekbare materiaal maakt langdurig dragen mogelijk. De antislip siliconen strips aan de buitenranden voorkomen onbedoelde beweging van de tube tijdens het gebruik ervan of het omkrullen van de tube bij de randen.

De tube biedt comfortabele ondersteuning en stroomlijnt de contouren van stomamateriaal. Hierdoor is de tube zeer discreet.

Uittrekken van de Hersubel Tube

Tijdens het uittrekken van de tube is het raadzaam om uw buik met een hand te ondersteunen aangezien bij het verwijderen van de tube de druk op uw buik verandert. Op deze wijze kan worden voorkomen dat het stomamateriaal verschuift of los getrokken wordt.

Onderhoud van de Hersubel Tube

De tube kan worden gewassen in de wasmachine op maximaal 40°C graden.

De tube aan de lucht laten drogen, dus niet in een droogtrommel of op de verwarming laten drogen, omdat daardoor het materiaal van de tube beschadigd kan worden.

Het advies is om geen wasverzachter te gebruiken.

Product overzicht Hersubel Tube

Varianten - hoogte 15 cm



Artikelnummer	Variant	Omschrijving
TU15BXS	XS- Beige	Breedte tot 75 cm
TU15ZXS	XS -Zwart	Breedte tot 75 cm
TU15BS	S- Beige	Breedte 75 tot 90 cm
TU15ZS	S- Zwart	Breedte 75 tot 90 cm
TU15BM	M- Beige	Breedte 90 tot 105 cm
TU15ZM	M- Zwart	Breedte 90 tot 105 cm
TU15BL	L- Beige	Breedte 105 tot 126 cm
TU15ZL	L- Zwart	Breedte 105 tot 126 cm
TU15BXL	XL- Beige	Breedte 120 tot 135 cm
TU15ZXL	XL- Zwart	Breedte 120 tot 135 cm
TU15BXXL	XXL- Beige	Breedte 135 cm tot 150 cm
TU15ZXXL	XXL- Zwart	Breedte 135 cm tot 150 cm

Varianten - hoogte 20 cm

Artikelnummer	Variant	Omschrijving
TU20BXS	XS- Beige	Breedte tot 75 cm
TU20ZXS	XS- Zwart	Breedte tot 75 cm
TU20BS	S- Beige	Breedte 75 tot 90 cm
TU20ZS	S- Zwart	Breedte 75 tot 90 cm
TU20BM	M- Beige	Breedte 90 tot 105 cm
TU20ZM	M- Zwart	Breedte 90 tot 105 cm
TU20BL	L- Beige	Breedte 105 tot 126 cm
TU20ZL	L- Zwart	Breedte 105 tot 126 cm
TU20BXL	X-L Beige	Breedte 120 tot 135 cm
TU20ZXL	XL- Zwart	Breedte 120 tot 135 cm
TU20BXXL	XXL- Beige	Breedte 135 cm tot 150 cm
TU20ZXXL	XXL- Zwart	Breedte 135 cm tot 150 cm

Product overzicht Hersubel Tube
Varianten - hoogte 26 cm



Artikelnummer	Variant	Omschrijving
TU26BXS	XS- Beige	Breedte tot 75 cm
TU26ZXS	XS- Zwart	Breedte tot 75 cm
TU26BS	S-Beige	Breedte 75 tot 90 cm
TU26ZS	S- Zwart	Breedte 75 tot 90 cm
TU26BM	M- Beige	Breedte 90 tot 105 cm
TU26ZM	M- Zwart	Breedte 90 tot 105 cm
TU26BL	L-Beige	Breedte 105 tot 126 cm
TU26ZL	L- Zwart	Breedte 105 tot 126 cm
TU26BXL	XL- Beige	Breedte 120 tot 135 cm
TU26ZXL	XL- Zwart	Breedte 120 tot 135 cm
TU26BXXL	XXL- Beige	Breedte 135 cm tot 150 cm
TU26ZXXL	XXL- Zwart	Breedte 135 cm tot 150 cm





Wellform Medical BV
Muskushouwsestraat 33
6666 MA Heteren • Nederland
T +31 (0)88 - 6670065 • E info@wellform.nl
www.wellform.nl



hersubel.com

ISS01/202205