

ZenSetiv Hydrocolloïde vormen ^{CE}



- ✓ Verkrijgbaar in diverse varianten
- ✓ Huidvriendelijk en absorberend
- ✓ Biedt bescherming voor de huid

Productomschrijving

De ZenSetiv Hydrocolloïde vormen beschermen de huid en bieden extra zekerheid. De vormen zijn gemaakt van huidvriendelijk en absorberend hydrocolloïd, afgewerkt met een flexibele toplaag. Het beschermt de huid bij stoma's, fistels of wonden.

De vormen kunnen gebruikt worden om de randen van stoma- of wondmateriaal huidvriendelijk te fixeren. Indien er een huiddefect aanwezig is bieden de ZenSetiv Hydrocolloïde vormen een absorptievermogen en een optimale huidbescherming.

Er zijn twee varianten verkrijgbaar: Regular en Ultra Thin.

ZenSetiv Hydrocolloïde vormen

Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

Vorbereiden

1. Knip, indien nodig, de vorm van het hydrocolloïd bij. Het hydrocolloïd moet rondom minimaal 1,5 tot 2 cm groter zijn dan het te beplakken gebied.
3. Breng de vorm aan op de huid en wrijf goed aan. Let op: de vorm hecht wel op een vochtige ondergrond, maar niet op een vette ondergrond.


Aanbrengen

2. Reinig de huid voorzichtig met lauw water en dep deze droog.

Verwijderen

4. Pel de vorm voorzichtig af. Ondersteun de huid hierbij en verwijder de vorm langzaam van boven naar beneden.

Verwissel de vorm indien er lekkage is, de vorm volledig verzadigd is of na een week.

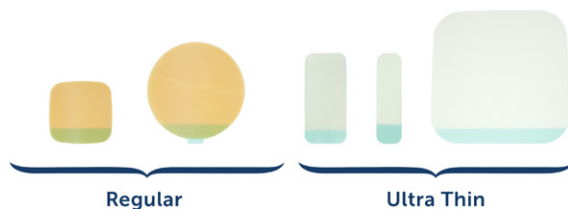

Voor meer informatie kijk op www.wellform.nl

Product	Inhoud	Artikelcode
ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Regular - rond, 12 cm	5 stuks	HSR120
ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Regular - 12,5 x 12,5 cm	5 stuks	HSR125
ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Ultra Thin - 20 x 20 cm	5 stuks	HSU200
ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Ultra Thin - 3 x 11 cm	20 stuks	HSU311
ZenSetiv Hydrocolloïde vormen - Ultra Thin - 5 x 11 cm	20 stuks	HSU511