

ZenSetiv Stomapleister ^{CE}



- ✓ Flexibele stomapleister
- ✓ Absorberend vermogen
- ✓ Voor het afdekken van een continent stoma of een stoma na irrigatie

Productomschrijving

De ZenSetiv Stomapleister is een pleister voor het afdekken van een continent stoma of een stoma na irrigatie. Net als een minizakje of stomacap kunnen de pleisters een stomazakje tijdelijk vervangen, voor extra comfort en zekerheid. De pleister bestaat uit een absorberende kern en een polyurethaan kleeflaag. Niet steriel en voor eenmalig gebruik.

ZenSetiv Stomapleister

Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

1. Reinig, indien nodig, de huid rondom de stoma met water. Gebruik geen alcohol, vette crèmes etc.
2. Verwijder één gedeelte van de beschermfolie aan de achterzijde van de pleister (zie foto 1)
3. Breng de pleister, van onder naar boven, aan over de stoma (zie foto 2)
4. Verwijder het tweede gedeelte van de beschermfolie aan de achterzijde van de pleister (zie foto 3)
5. Wrijf de pleister goed aan, zodat deze gereed is voor gebruik (zie foto 4)



Voor meer informatie kijk op www.wellform.nl

Product	Inhoud	Artikelcode
ZenSetiv Stomapleister, 7,5 cm x 7,5 cm	20 stuks	ASPLA75
ZenSetiv Stomapleister, 10 cm x 10 cm	20 stuks	ASPLA100