


ZenSetiv Siliconenpleisters met split ^{CE}

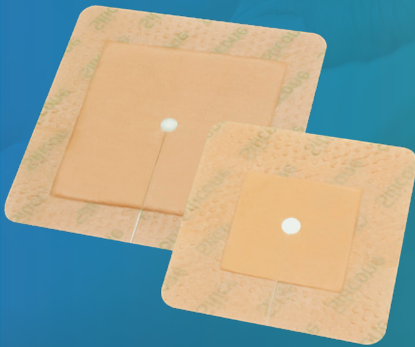

- ✓ Vormt zich passend rond de drain, sonde of katheter
- ✓ Hoog draagcomfort, dankzij de huidvriendelijke, siliconen kleeflaag
- ✓ Absorberend schuimverband

Productomschrijving


De ZenSetiv Siliconenpleisters met split zijn uitstekend geschikt voor het afdekken van de insteekopening van drains, sondes en katheters. De flexibele ZenSetiv pleister met split vormt zich, met behulp van de opening aan het uiteinde van de split, passend rond de drain, sonde of katheter. De pleisters zijn voorzien van een huidvriendelijke siliconen kleeflaag waardoor het aanbrengen en verwijderen van de pleisters zeer eenvoudig is. De pleisters bevatten bovendien een absorberend schuimverband dat kleine hoeveelheden (wond)vocht kan absorberen en vasthouden.

ZenSetiv Siliconenpleisters met split

Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

1. Reinig eerst zo nodig de huid rondom de insteekopening van de drain, sonde of katheter. Vermijd eventueel gebruik van alcohol, vette crèmes etc.
2. Verwijder één gedeelte van de beschermfolie van de pleister.
3. Breng de pleister in de juiste positie. Met behulp van de split kan de opening tot aan de drain, sonde of katheter gebracht worden.
4. Breng de pleister op de huid aan.
5. Verwijder vervolgens het andere gedeelte van de beschermfolie van de pleister.
6. Breng het resterende gedeelte van de pleister op de huid aan.
7. Wrijf de pleister aan.

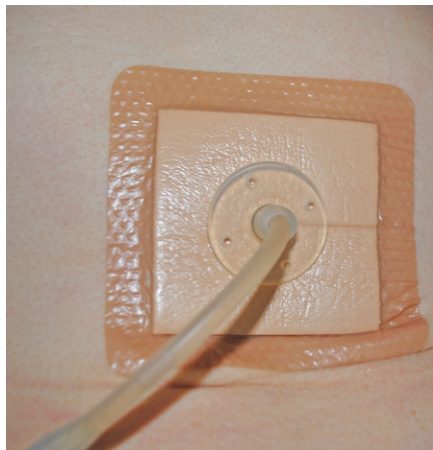

Voor meer informatie kijk op www.wellform.nl

Product	Inhoud	Artikelcode
ZenSetiv Siliconenpleisters met split - 7,5 cm x 7,5 cm	20 stuks	ASR275
ZenSetiv Siliconenpleisters met split - 10 cm x 10 cm	20 stuks	ASR2100