


# ZenSetiv Siliconenpleisters <sup>CE</sup>

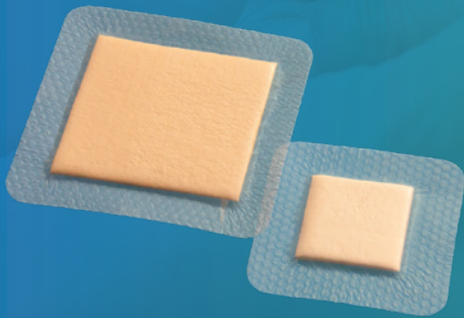

- ✓ Zeer soepele pleisters
- ✓ Voorzien van een huidvriendelijke, siliconen kleeflaag
- ✓ Met absorberende kern

## Productomschrijving

De ZenSetiv Siliconenpleisters zijn zeer geschikt voor het afdekken van een continent stoma.  
De huidvriendelijke, siliconen kleeflaag zorgt voor groot draagcomfort.  
De ZenSetiv Siliconenpleisters zijn voorzien van luchtdoorlatend schuimverband, dat in staat is om kleine hoeveelheden vocht te absorberen.

Stomadragers die irrigeren kunnen de ZenSetiv Siliconenpleisters gebruiken.  
Net als een minizakje of stomachap kunnen de pleisters een stomazakje tijdelijk vervangen en zorgen deze voor extra comfort en zekerheid.

# ZenSetiv Siliconenpleisters

## Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

1. Reinig, indien nodig, de huid rondom de stoma met water. Maak daarna de huid droog. Gebruik geen alcohol, vette crèmes etc.
2. Verwijder één gedeelte van de beschermfolie van de pleister (zie foto 1).
3. Breng de pleister van onder naar boven aan (zie foto 2).
4. Verwijder vervolgens het andere gedeelte van de beschermfolie van de pleister (zie foto 3).
5. Wrijf de pleister goed aan zodat deze gereed is voor gebruik (zie foto 4).

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Voor meer informatie kijk op [www.wellform.nl](http://www.wellform.nl)

Product	Inhoud	Artikelcode
ZenSetiv Siliconenpleisters, 7,5 cm x 7,5 cm	20 stuks	ASP275
ZenSetiv Siliconenpleisters, 10 cm x 10 cm	20 stuks	ASP2100