


ZenZipp All-In-One Wound Manager ^{CE}

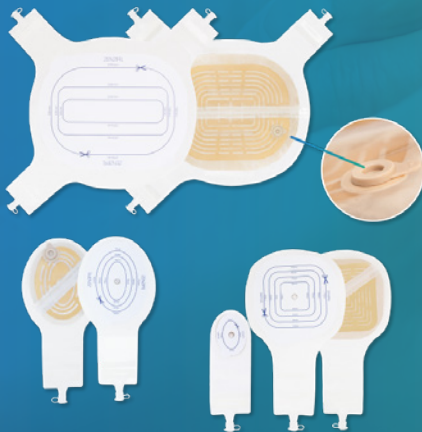

- ✓ Huidplaat van huidvriendelijk hydrocolloïd
- ✓ Diverse maten zijn voorzien van 3 outlets
- ✓ Verkrijgbaar met of zonder zipper

Productomschrijving

De ZenZipp All-In-One Wound Manager kan gebruikt worden bij behandeling van grote, vaak postoperatieve wonden die drainage vereisen. Bovendien is het product ook zeer geschikt bij fistels.

Diverse maten hebben een uniek werkluk, namelijk een zipper die over de volledige wondmanager te openen is én waarbij de zijanten vastgezet kunnen worden zodat er een optimaal werkgebied gecreëerd wordt. Door de flexibele en huidvriendelijke huidplaat kan de wondmanager (afhankelijk van protocol) maximaal tot 7 dagen blijven zitten. Alle maten van de ZenZipp wond- en fistelmanagers zijn steriel en voorzien van een geïntegreerd ventiel.

ZenZipp All-In-One Wound Manager

Extra informatie

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant

1. De huid rondom de wond dient schoon en droog te zijn. Vermijd het gebruik van crèmes en poeder zoveel mogelijk.
2. Knip de wondmanager op maat (zie foto 1).
3. Verwijder de beschermfolie van het hydrocolloïd en breng de wondmanager aan op de huid en wrijf deze glad rondom de wond.
4. Sluit het werkluik met behulp van de zipper en zorg ervoor dat de zipper schoon is alvorens deze wordt gesloten (zie foto 2).
5. De drainagesluitingen dienen gesloten te blijven totdat afvoer of toediening van vocht/vloeistof noodzakelijk is (zie foto 3).

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Product	Inhoud	Artikelcode
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 50 x 30 mm	10 stuks	ZZ050030N
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 110 x 75 mm met zipper	10 stuks	ZZ110075
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 110 x 75 mm	10 stuks	ZZ110075N
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 110 x 110 mm met zipper	5 stuks	ZZ110110
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 110 x 110 mm	5 stuks	ZZ110110N
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 170 x 120 mm met zipper (voorzien van 3 outlets)	3 stuks	ZZ170120
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 170 x 120 mm (voorzien van 3 outlets)	3 stuks	ZZ170120N
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 220 x 170 mm met zipper (voorzien van 3 outlets)	3 stuks	ZZ220170
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 220 x 170 mm (voorzien van 3 outlets)	3 stuks	ZZ220170N
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 270 x 190 mm met zipper (voorzien van 3 outlets)	3 stuks	ZZ270190
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 270 x 190 mm (voorzien van 3 outlets)	3 stuks	ZZ270190N
ZenZipp Fistel- en Wondmanager 390 x 240 mm met zipper (voorzien van 3 outlets)	3 stuks	ZZ390240